




**FRESENIUS
KABI**
caring for life





А что использовать в детской практике?

Р.Ягубян


22 декабря 2021

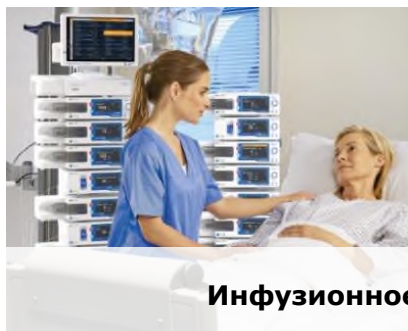


Инфузионное оборудование

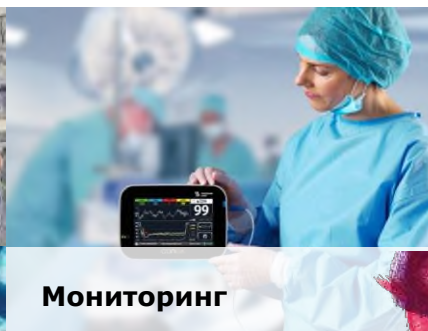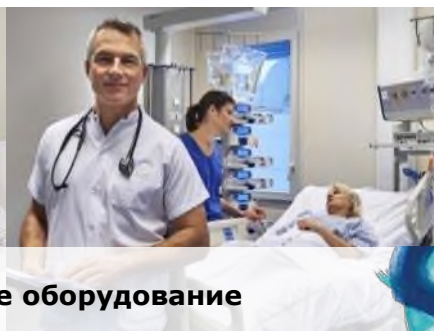


Мониторинг

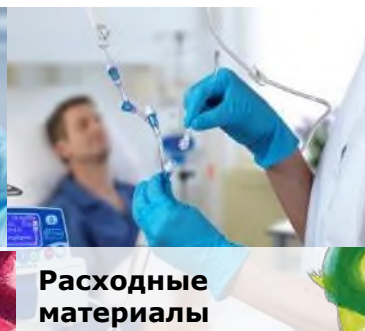

Расходные материалы

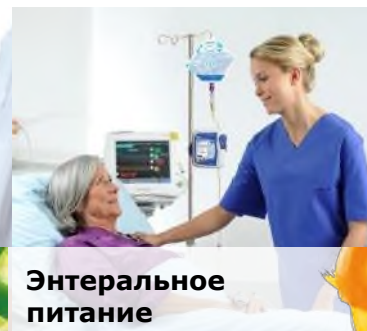

Энтеральное питание

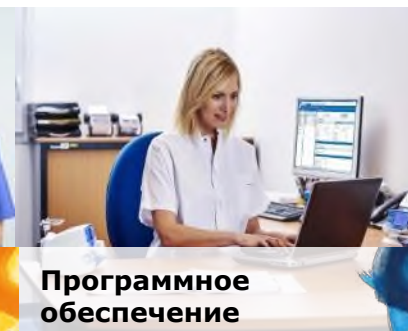


Программное обеспечение

Педиатрические магистральи для волюметрических насосов Фрезениус Каби


VL ST10	VL ST01	VL ST02	VL ST42	VL ON30	VL ON42	SL	SL Filter	VL ON70	VL ON72	VL ON90	VL TR00	VL TR12	VL PA02	VL PA92	VL PN00	VL PN02
M46441300S	M46441600S	M46441900S	M46442600S	M46445900S	M46444000S	M77460020	M77460025	M46444600S	M46444100S	M46444900S	M46442800S	M46442700S	M46442200S	M46445200S	M46444300S	M46444400S
Infusion	Infusion	Infusion	Infusion			Infusion	Infusion				Transfusion	Transfusion	Infusion	Infusion	Infusion	Infusion
																

PA02 - M46442200S

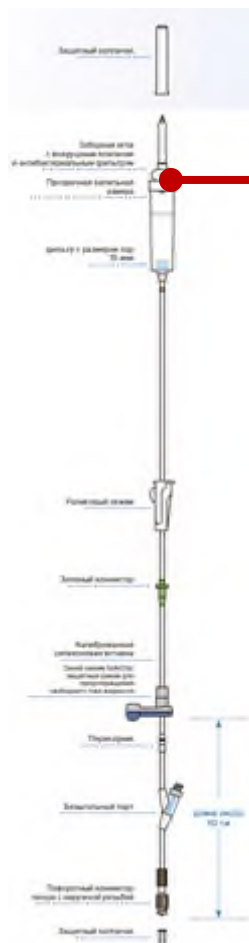


Педиатрическая капельная камера – с капельником 60 кап./мл с фильтром 15 мкм и с воздушным клапаном

Капельная камера: педиатрическая

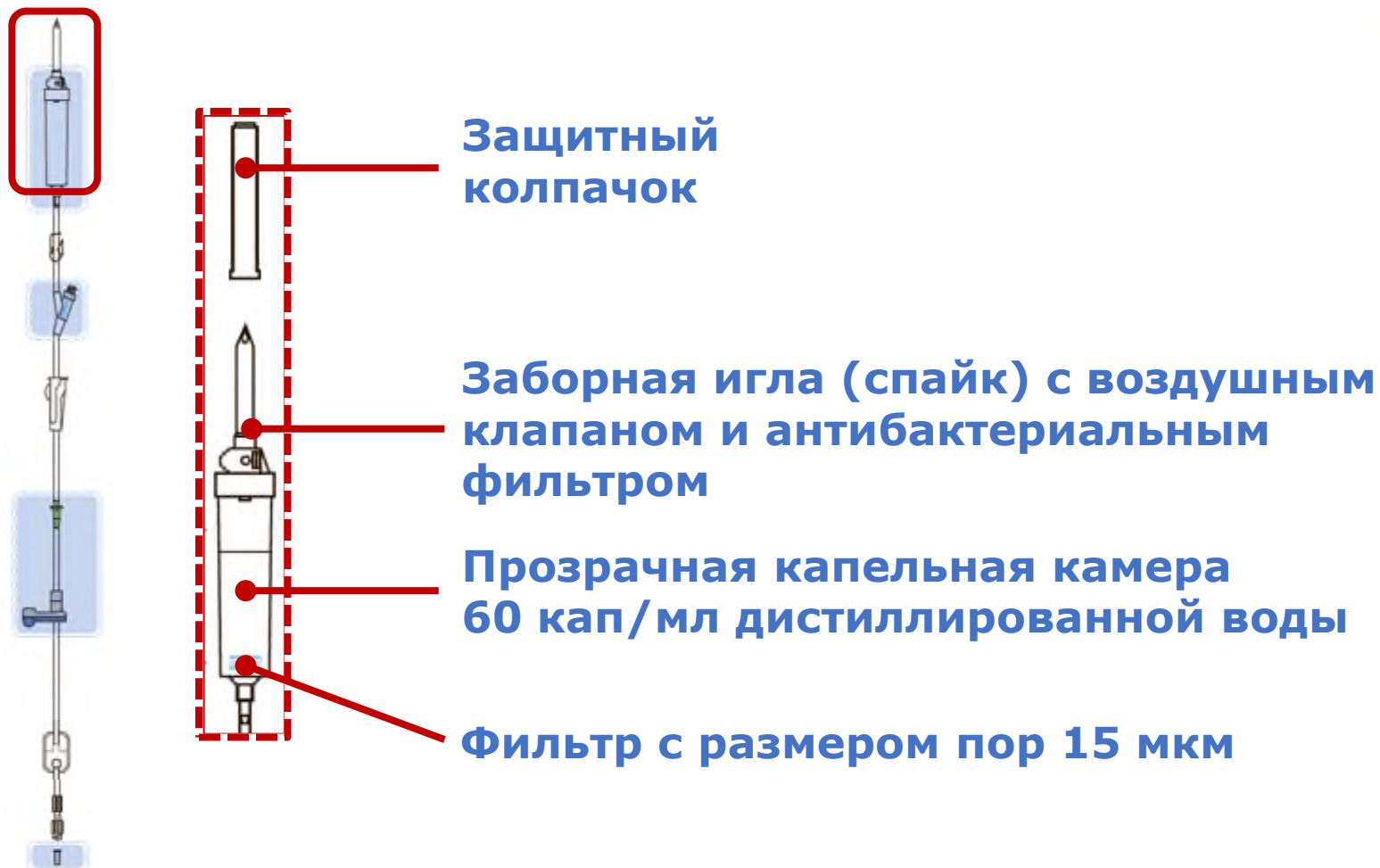

PA02 - M46442200S

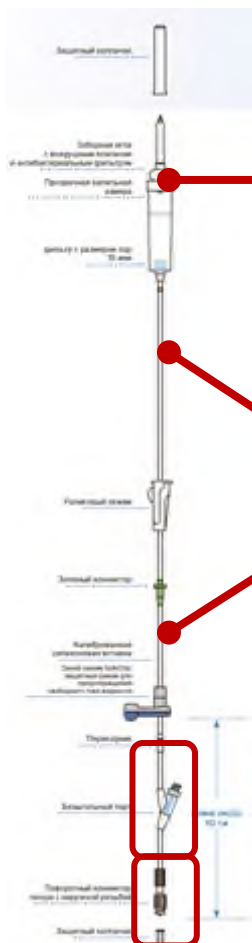

Педиатрическая капельная камера – с капельником 60 кап./мл с фильтром 15 мкм и с воздушным клапаном

**Система из ПВХ с силиконовым калиброванным сегментом, без DEHP, без латекса, уменьшенной длины и диаметра (после калиброванного сегмента)
Примерная общая длина – 180 см
Примерный объем заполнения – 16 мл**

Нижний безыгольный порт K-Nect

«Вращающийся» Луэр-Лок с фильтром от свободного тока жидкости


ДЕМОНСТРАЦИЯ



**FRESENIUS
KABI**

caring for life


PA92 - M46445200S

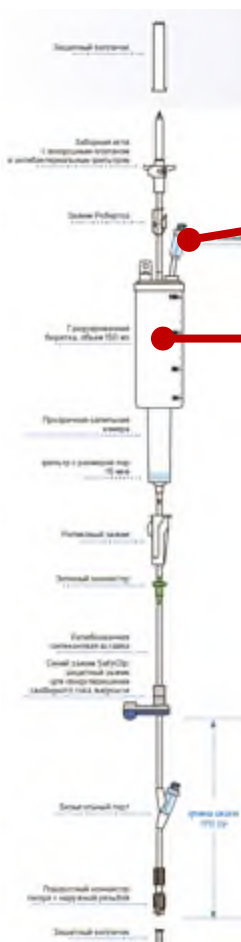

**Безыгольный порт бюретты – для добавления в
бюретту растворов**


**Бюретта на 150 мл – для смешивания различных
растворов**

Капельная камера: бюретта



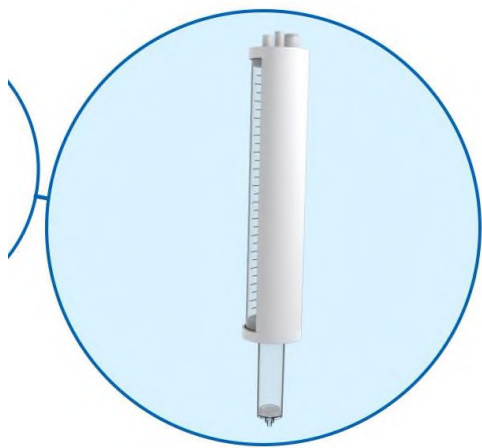




Детям до 2-х лет

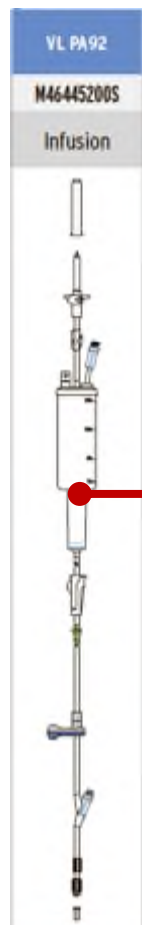

1. PA92 - Градуированная бюретка на 150 мл + один безыгольный порт K-Nect

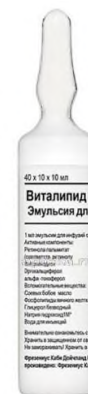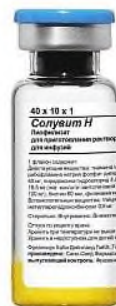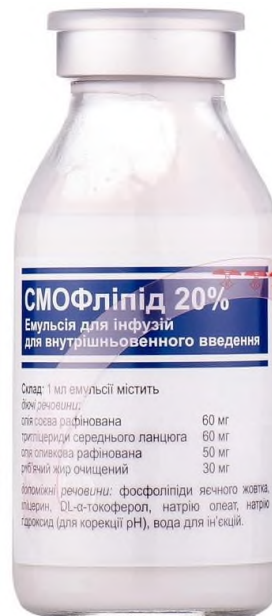

Детям до 2-х лет



Перекрываем роликовый зажим

Детям до 2-х лет



Подвешивается раствор глюкозы

Открываем зажим Роберта

Бюретта заполняется необходимым объемом глюкозы

Потом перекрываем зажим Роберта



Детям до 2-х лет



Набирается в шприц необходимый
объем Аминовена инфанта



Детям до 2-х лет



Бюретта заполняется необходимым объемом Аминовена Инфанта

Детям до 2-х лет



Набирается в шприц необходимый
объем СМОФЛипида



Детям до 2-х лет




Бюретта заполняется необходимым объемом СМОФЛипида

Детям до 2-х лет



Набирается необходимый объем
Солувита и Виталипида Детского в
шприц

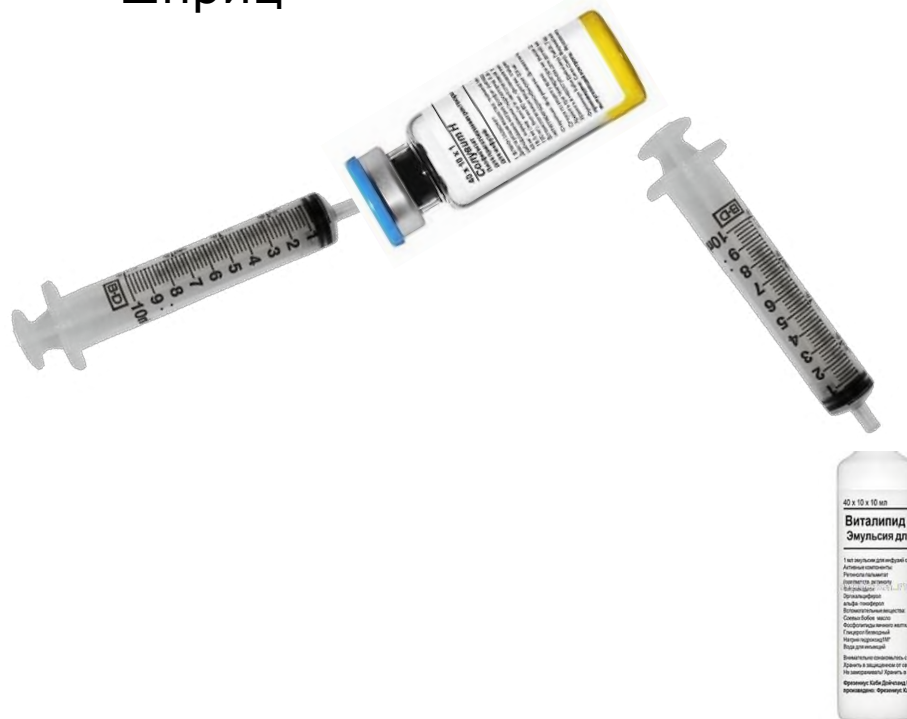

Детям до 2-х лет



Витамины вливаются в бюретку

Детям до 2-х лет



Перемешиваем раствор в бюррете

Заполняем капельную камеру

Открываем роликовый зажим и заполняем магистраль
Затем перекрываем роликовый зажим

Детям до 2-х лет



Система устанавливается в насос и подключается к пациенту




ДЕМОНСТРАЦИЯ




**FRESENIUS
KABI**

caring for life

ПЕДИАТРИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ВОЛЮМАТА

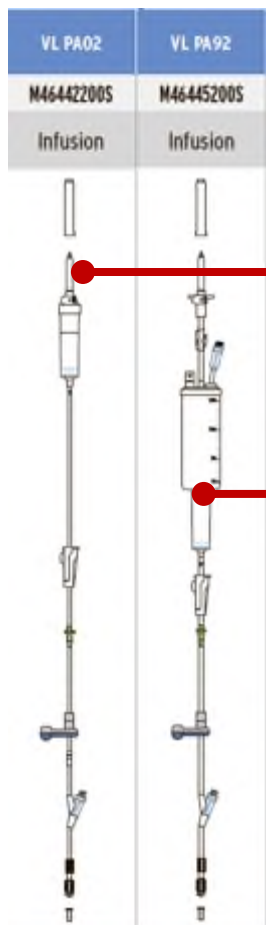

1. PA02 - короткая система с уменьшенным объемом для заполнения (15 мл) и одним безыгольным портом K-Nect. Специальная капельница – 60 капель/мл
2. PA92 - Градуированная бюретка на 150 мл + один безыгольный порт K-Nect

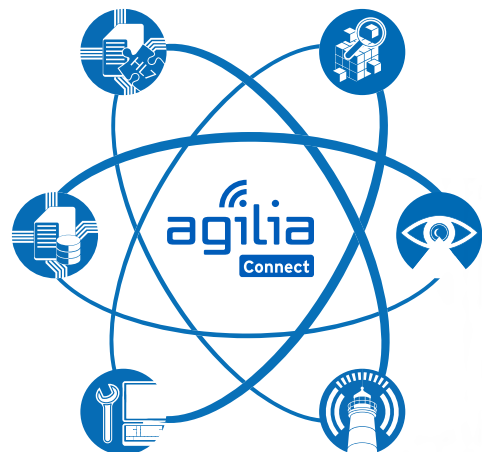

Спасибо

за

внимание!

INfusia



© Copyright Fresenius Kabi AG



Amika

COMOX

